



## Pobranie w Twoim domu

### Teraz możesz samodzielnie pobrać próbkę krwi w zasiszu własnego domu

1. Wybierz w zamówieniu opcję pobierania próbki krwi w domu.
2. Wybierz paczkomat InPost do którego mamy wysłać Twój zestaw do domowego pobrania krwi z palca.
3. Otrzymasz od nas e-mail potwierdzający Twoje zamówienie oraz informacje jak odebrać i zwrócić paczkę na nasz koszt.
4. Do 4 dni roboczych od daty zamówienia otrzymasz od In-post e-mail/SMS potwierdzający wysłanie przesyłki do wybranego paczkomatu InPost.
5. Po przybyciu przesyłki do wybranego paczkomatu - zwykle następnego dnia roboczego po jej nadaniu - otrzymasz e-mail/sms od InPost informujący o kodzie do otwarcia paczkomatu oraz maksymalnym terminie jej odbioru.

6. Odbierz przesyłkę z wybranego paczkomatu wpisując numer telefonu i kod podany w wiadomości od InPost
7. W dowolny poniedziałek, wtorek lub środę (nie pobieraj krwi w inne dni tygodnia) pobierz próbkę krwi postępując zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w zestawie.
8. Nie zapomnij opisać etykiety, którą nakleisz na srebrną kopertę (wymagane dane - imię i nazwiskiem pacjenta, data pobrania oraz numer zamówienia Allergomedica)

**Uwaga!** Pobrana probka krwi powinna być odesłana tego samego dnia co pobranie poprzez dowolny paczkomat InPost w Polsce. Pamiętaj by pobrać krew TYLKO w poniedziałek, wtorek lub środę! Odeślij krew jeszcze tego samego dnia - najlepiej bezpośrednio po jej pobraniu!

## **Jak odesłać kopertę z próbką pobranej krwi**

1. Wejdź na stronę <https://szybkiezwroty.pl/p>
2. W menu WYSZUKAJ SWÓJ SKLEP wybierz FoodID Allergomedica - testy molekularne.
3. Wpisz numer zamówienia InPost z etykiety pudełka które otrzymałeś, swoje imię i nazwisko, adres e-mail i nr telefon.
4. SMSem otrzymasz kod cyfrowy - kod zwrotu w dodatkowym paczkomacie InPost.
5. Srebrną kopertę oklej opisaną wcześniej etykietą. Umieść srebrną kopertę w załączonej większej białej kopercie bąbelkowej i szczelnie ją zaklej.
6. Nieopisaną białą kopertę zanieś do dowolnego paczkomatu InPost.
7. W paczkomacie wybierz opcję - nadaj paczkę.
8. Wybierz opcję - posiadam kod zwrotu.
9. Wpisz kod z SMSa który otrzymałeś od SzybkieZwroty.pl. Otworzy się jedna ze skrzynek paczkomatu InPost.
10. Umieść białą kopertę w otwartej skrzynce InPost i zamknij paczkomat. Twoja przesyłka zostanie przesłana bezpośrednio do naszego laboratorium

Wyniki testu otrzymasz do 10 dni roboczych od dnia odesłania przesyłki.